

## NOLEGGIO CLICKHOLTER CARDIOLINE - FAQ

DOMANDE	RISPOSTE
Come avvio la registrazione? (Per i dettagli consultare le 4 pagine cartacee di avvio registrazione all'interno della carpetta)	Premendo sul joystick centrale, selezionando il simbolo dell'ECG in alto a destra, controllando i dati (durata e frequenza, eventuale messaggio vocale, verifica qualità tracce) e procedendo con le frecce arancioni a destra fino all'avvio della registrazione.
Cosa significa il led blu lampeggiante?	Che l'Holter sta registrando regolarmente
Cosa succede se si scarica la batteria?	Il registratore emetterà un suono "bip" singolo ad intervalli regolari. Sugeriamo di cambiare immediatamente le pile (stilo AA di ricambio incluse nel pacco QUET) dal vano posteriore. La registrazione riprenderà regolarmente a batterie sostituite.
Come posso interrompere la registrazione?	Premendo verso il basso il joystick arancione al centro del registratore, ti sarà poi chiesta conferma sullo schermo
Cosa succede se per qualche motivo la registrazione viene interrotta?	La registrazione fatta fino al momento dell'interruzione rimane salvata.
Cosa significa se l'Holter emette 4 suoni "bip" ad intervalli regolari?	Un elettrodo è scollegato. Riattaccarlo al paziente quanto prima.

Si raccomanda la massima cura nell' attaccare/staccare i cavi (operazione solitamente non necessaria)

---

### QUET

Sito - [www.quet.it](http://www.quet.it)

Telefono e whatsapp - Michela 375 7192413 Luca 366 3634835

Email - [ciao@quet.it](mailto:ciao@quet.it). Siamo a Castel San Pietro (BO) in via Roma 2